

## Instruções de uso:

### PASSO

1

**Preparação da ferida:** Limpar e secar bem a ferida. Verificar se há corpo estranho. Assegurar que a hemostasia foi alcançada e as bordas de ferida aproximadas.



### PASSO

2

**Abrir a ampola:** Remover o aplicador do pacote usando uma técnica estéril. Segurando o aplicador com a mão, com a ponta para baixo, apertar as asas ligadas ao corpo do aplicador até que a ampola em seu interior quebre.



### PASSO

3

**Preparação do dispositivo:** Ao romper a ampola, a cola irá automaticamente fluir para dentro do aplicador. Aperte suavemente as asas para liberar a cola até a ponta. O dispositivo está agora pronto para ser usado.



### PASSO

4

**Cuidados:** Se usar perto da área dos olhos ou mucosa, usar vaselina para criar uma barreira e gaze cirúrgica para proteger os olhos do paciente, minimizando o risco de colagem de regiões inadequadas.



### PASSO

5

**Aplicação:** Aproximar as bordas da ferida com os dedos ou pinça. Aplicar o adesivo liquiband optima ao longo do comprimento da ferida. As bordas da ferida devem ser aproximadas em conjunto por 10 segundos até o liquiband OPTIMA secar e selar a ferida.



### PASSO

6

**Descarte:** Descartar o material após o uso em local adequado. O liquiband Optima é **um produto de uso único**.

